

ORDOLINE


Retentsioonikapede
juhend



Palju õnne! Oled edukalt lõpetanud oma ravi Ordoline kapedega!

Kas teadsid, et inimese hambad on pidevas liikumises, mistõttu on oluline ka pärast ravi hambad fikseerida retentsioonikapede abil õigesse asendisse. Leiate need sellest pakendist ja usume, et kandes neid vastutustundlikult vastavalt juhistele, aitavad need tagada pikaajalise ravitulemuse.

Parima tulemuse säilitamiseks soovitame kanda retentsioonikapesid järgmise skeemi järgi:

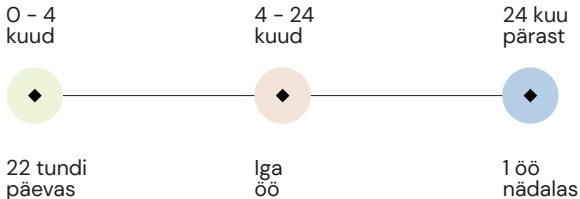

Soovitused kasutamiseks

- Alustage kapede paigaldamist esihammastest ja lõpetage tagumiste purihammastega
- Kapede eemaldamisega alustage tagumistelt purihammastelt ja lõpetage esihammastega.

Retentsioonikapede hooldus

Retentsioonikapede hooldamiseks kasutage hambaharja ja -pastat, mis ei sisalda abrasiivseid aineid, nagu alumiiniumoksiid, kaltsiumkarbonaat, kaltsiumfosfaat (need ained on valgendavas hambapastas). Puhastage leige või külma voolava vee all.

Suuhooldus

Harjake hambaid tavapäraselt – hambaharja ja
-pastaga, kasutage hambaniiti.

Kui kape deformeerub, läheb kaduma, saab kahjustada
või kahjustub suu limaskest- soovitame pöörduda oma
raviarsti poole. Oluline on lõpetada kahjustatud kapede
kandmine.

Vajadusel soovitame pöörduda kapede tootja –
Ordoline poole.

Teavitage tootega seotud tõsisest vahejuhtumist
tootjale ja selle riigi pädevale asutusele, kus te
tervishoiuteenuseid saite.

Innustame teid oma positiivset kogemust jagama ka sotsiaalmeedia platvormidel märkides meid @Ordoline oma postitustel.

Terve ning kaunis naeratus võib muuta elusid- aita ka teistel jõuda selleni!

Ordoline eemaldatavate retentsioonikapede juhised teistes keeltes leiate alloleva QR-koodiga.



ORDOLINE
— — — — —





Teave isikuandmete töötlemise kohta

Isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi – GDPR) artikli 14 kohaselt teavitame teid, et teie isikuandmete töötleja on UAB Ordoline (registreerimis nr: 305610551; aadress: A. Vivulskio 7–202, Vilnius, Leedu). Kogu info seoses teie isikuandmete töötlemisega, mis on sätestatud GDPR artiklis 14, on avaldatud ja kättesaadav Ordoline kodulehel:

<https://ordoline.ee/privaatsuspoliitika/>

Juhendi läbivaatamise kuupäev: 10.08.2023

UAB Ordoline
A. Vivulskio 7–202
LT-03162 Vilnius, Leedu