

ORDOLINE

Instructies
voor retentie
aligners



Gefeliciteerd met het afronden van je behandeling met Ordoline-aligners! Samen hebben we geweldige resultaten behaald!

Het is belangrijk om te begrijpen dat menselijke tanden voortdurend verschuiven, dus na de behandeling is het noodzakelijk om de juiste tandstand te behouden met behulp van retentie-aligners. Je vindt deze aligners in de verpakking en we vertrouwen erop dat je ze op verantwoorde wijze draagt om consistente behandelresultaten te garanderen.

Voor het beste resultaat raden we aan om de retentie-aligners volgens het volgende schema te dragen:

0 - 4
maanden



Draag de
aligners 22 uur
per dag.

4 - 24
maanden



Draag de
aligners
elke nacht.

Na 24
maanden



Draag de
aligners
1 nacht
per week.

Gebruiksaanbevelingen voor de aligners

- Begin met het plaatsen van de aligners op de voortanden en ga geleidelijk naar de achterste kiezen.
- Begin bij de achterste kiezen en eindig bij de voortanden als je de aligners verwijdert.

Onderhoud van retentie-aligners

Voor een goed onderhoud van de retentie-aligners is het belangrijk om een tandenborstel en tandpasta te gebruiken zonder schurende stoffen zoals aluminiumoxide, calciumcarbonaat of calciumfosfaat (deze stoffen worden vaak aangetroffen in witmakende tandpasta). Was de aligners onder stromend lauw of koud water wanneer je ze reinigt.

Mondverzorging

Blijf voor de mondverzorging je tanden poetsen zoals gewoonlijk met een tandenborstel en tandpasta en gebruik interdentale flosdraad.

Als je verlies, beschadiging, vervorming van de retentie-aligner of beschadiging van het mondslijmvlies ervaart, raden we aan contact op te nemen met je behandelend tandarts of zorgspecialist.

Het is cruciaal om geen beschadigde aligners te dragen. Indien nodig kun je ook overwegen om contact op te nemen met Ordoline, de fabrikant van de aligners.

In geval van een ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel, dien je dit te melden aan zowel de fabrikant als de bevoegde autoriteit van het land waar je je bevindt als gebruiker en/of patiënt.

We willen je aanmoedigen om je positieve behandelervaring te delen om anderen te inspireren en te helpen bij de beslissing om een behandeling met Ordoline-aligners te ondergaan. Je kunt dit doen door je ervaring te delen op sociale netwerken en @Ordoline te taggen. Een gezonde en mooie lach kan iemand echt transformeren.

Volg de QR-code voor instructies over het gebruik van verwijderbare orthodontische beugels van Ordoline in andere talen.



ORDOLINE
— — — — —



Mededeling over de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), informeren wij je dat LLC Ordoline, legal entity code: 305610551; adres: A. Vivulskio str. 7-202, Vilnius, Litouwen, de verantwoordelijke is voor de verwerking van je persoonsgegevens. We publiceren alle informatie zoals bedoeld in artikel 14 van de AVG met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens op de website van Ordoline <https://ordoline.com/patient-privacy-policy/>

Datum van herziening van de instructie: 2023-08-10

LLC Ordoline
A. Vivulskio str. 7-202
LT-03162 Vilnius, Litouwen