

ORDOLINE

Instrukcje
dotyczące nakładek
retencyjnych

PL



Gratulacje z okazji ukończenia leczenia za pomocą nakładek Ordoline! Osiągnęliśmy razem doskonały efekt!

To ważne, aby zrozumieć, że zęby u ludzi stale zmieniają swoje położenie, dlatego po zakończeniu leczenia konieczne jest noszenie nakładek retencyjnych w celu utrzymania prawidłowej pozycji zębów. Nakładki te znajdziesz w przesyłce i mamy nadzieję, że będziesz je nosić w odpowiedzialny sposób, co zagwarantuje utrzymanie wyników leczenia.


Najlepsze efekty osiągniesz, nosząc nakładki retencyjne zgodnie z następującym harmonogramem:



Zalecenia dotyczące korzystania z nakładek

Zakładanie nakładek
rozpoczyna się od przednich zębów.

Unikaj
zagryzania
podczas
zakładania
nakładek.

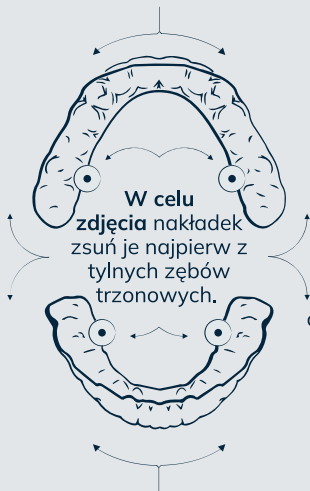

Upewnij się,
że nakładki są
założone w
sposób
prawidłowy i
ciasno przylegają
do zębów.

Zakładanie nakładek
rozpoczyna się od przednich zębów.

Konserwacja nakładek retencyjnych

Aby odpowiednio dbać o nakładki retencyjne, ważne, żeby używać w tym celu szczoteczki i pasty do zębów niezawierającej substancji ściernych, takich jak tlenek glinu, węgiel wapnia czy fosforan wapnia (substancje te są często obecne w pastach wybielających). Podczas czyszczenia nakładek myj je pod letnią lub zimną bieżącą wodą.

! Należy pamiętać, że nakładki ortodontyczne nie są przeznaczone do leczenia bruxizmu ani mimowolnego zgrzytania zębami. Jeśli zgrzytasz zębami, koniecznie poinformuj o tym swojego lekarza, aby można było

Higiena jamy ustnej

W celu zadbania o higienę jamy ustnej myj zęby tak, jak zazwyczaj, przy użyciu szczoteczki i pasty do zębów, używaj nici dentystycznych.

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub deformacji nakładek retencyjnych lub wystąpienia ran błony śluzowej jamy ustnej zalecamy skontaktowanie się ze swoim stomatologiem lub innym specjalistą. To ważne, aby nie nosić uszkodzonych nakładek. W razie potrzeby możesz także rozważyć kontakt z producentem nakładek, Ordoline.

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego z wyrobem zgłoś go producentowi oraz właściwym organom w kraju, w którym, jako użytkownik i/lub pacjent, przebywasz.

Zachęcamy do podzielenia się pozytywnym doświadczeniem z leczenia, aby zainspirować innych i pomóc im w wyborze leczenia z wykorzystaniem nakładek Ordoline. Możesz to zrobić, dzieląc się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych, z których korzystasz, tagując @Ordoline. Zdrowy i piękny uśmiech potrafi zdziałać cuda.



Zeskanuj kod QR, aby
zostawić swoją opinię.



Wskazówki dotyczące korzystania z
wyjmowanych nakładek retency-
jnych Ordoline można uzyskać,
skanując podany kod QR.

ORDOLINE

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z artykułem 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”) informujemy, że UAB Ordoline, kod podmiotu prawnego: 305610551; adres: A. Vivulskio str. 7-200, Wilno, Litwa jest administratorem Twoich danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące artykułu 14 ustawy RODO w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych są dostępne na stronie Ordoline <https://ordoline.com/pl/privacy-policy/>

Data aktualizacji wskazówek: 20.07.2025

Ordoline
A. Vivulskio str. 7-200
LT-03162 Wilno, Litwa
www.ordoline.com

