

ORDOLINE

Instrucțiuni
pentru capele
de contenție

RO



Felicitări pentru finalizarea tratamentului dumneavoastră cu capele Ordoline! Împreună am obținut rezultate grozave!

Este important să înțelegeți faptul că dinții umani se deplasează constant, așa că, după efectuarea tratamentului, este important să mențineți poziția corectă a dinților utilizând capele de contenție. Veți găsi aceste cape în pachetul furnizat și contăm pe dumneavoastră să le purtați cu răspundere pentru ca tratamentul să aibă rezultatele dorite.

Pentru a obține rezultate optime, vă recomandăm să purtați capele de contenție urmând programul de mai jos:



Recomandări pentru utilizarea capelor

Începeți prin așezarea capei
gutiera pe dinții din față.

Evitați să
mușcați în
timp ce așezați
capele.

Înlăturați
capa începând
de la molarii
din spate.

Asigurați-vă că
acestea sunt
poziționate
corect și fixate
pe dinți.

Începeți prin așezarea
capei pe dinții din față.



Întreținerea capelor de contenție

Pentru a avea grijă într-un mod corect de gutierele de contenție, utilizați o periuță și o pastă de dinți care nu conține substanțe abrazive, precum oxid de aluminiu, carbonat de calciu sau fosfat de calciu (aceste substanțe se regăsesc frecvent în pastele de dinți pentru albire). Atunci când curățați capele, spălați-le sub jet de apă caldă sau apă rece.

! Vă rugăm să rețineți că gutierele ortodontice nu sunt destinate bruxismului sau scrâșnirii involuntare a dinților. Dacă scrâșniți din dinți, informați-vă medicul pentru a vi se putea oferi un plan de tratament individual.

Îngrijirea orală

Pentru îngrijirea orală, spălați-vă dinții așa cum faceți de obicei, utilizând periuța și pasta de dinți și folosiți ață dentară.

În cazul în care capa de contenție se pierde, se deteriorează, se deformează sau apar leziuni ale mucoasei orale, vă recomandăm să contactați medicul dentist al dumneavoastră sau un specialist în îngrijire medicală.

Este esențial să nu purtați capele deteriorate. Dacă este necesar, puteți contacta producătorul capelor Ordoline.

În cazul producerii unui incident grav care are legătură cu acest dispozitiv, vă rugăm să-l raportați producătorului și autorității competente din țara în care locuiți, în calitate de utilizator și/sau pacient.

Vă invităm să împărtășiți experiențele dumneavoastră pozitive de tratament pentru a inspira și alte persoane și a le ajuta în decizia de a opta pentru un tratament cu capele Ordoline.

Puteți descrie experiența dumneavoastră pe rețelele de socializare și aplicând eticheta @Ordoline. Un zâmbet sănătos și frumos are puterea de a transforma.



Scanează codul QR pentru
a lăsa recenzia ta.



Pentru instrucțiuni de utilizare a
caperelor ortodontice detasabile
Ordoline în alte limbi, vă rugăm să
scanați codul QR furnizat.



Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu articolul 14 al Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (denumit în continuare GDPR), vă informăm că UAB Ordoline, cu cod de înregistrare: 305610551; adresa: A. Vivulskio str. 7-202, Vilnius, Lituania este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. Toate informațiile prevăzute la articolul 14 al GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt publicate pe site-ul web Ordoline <https://ordoline.com/ro-ro/privacy-policy/>

Data revizuirii materialului: 20.07.2025

Ordoline
A. Vivulskio str. 7-200
LT-03162 Vilnius, Litouwen
www.ordoline.com

